

PRECONISATIONS POUR L'INSTALLATION D'UN AUTOCLAVE EURONDA

Vous venez de commander un autoclave Euronda et nous vous en remercions.

Pour nous permettre de réaliser au mieux l'installation de votre appareil, nous vous saurions gré de suivre au préalable les indications suivantes :

1. L'emplacement :

La surface d'une profondeur minimum de 55 cm devra être plane et supporter 50 kg.

Dans le cas d'un meuble colonne, prévoir un plateau sur glissière de mêmes caractéristiques et tenir compte de l'ouverture de la trappe de remplissage (Autoclave H x 445mm +155 pour la trappe)

Si l'emplacement se situe sur un plan de travail ou dans une colonne, le passage pour les câbles et les tuyaux devra déjà être effectué à l'arrière de la machine en cas d'option aquafilter et vidange.

Notre technicien ne sera pas en mesure de placer l'appareil en hauteur.

Il est fortement déconseillé de le mettre l'autoclave à + de 1 m de hauteur car en cas de dommages corporels les assurances ne les prendraient pas en charge.

L'encombrement : P = 610 x L= 450 x H = 445 mm + 155 mm avec la trappe ouverte pour remplissage d'eau et nettoyage des réservoirs (voir ci-dessus)

2. Branchement autoclave:

Il est nécessaire de prévoir une prise électrique de 16A avec terre

Il faudra éviter les rallonges.

3. Option déminéralisateur :

Prévoir par un plombier agréé, une arrivée d'eau de diamètre 20/27 type machine à laver, à moins de 2 m de l'emplacement de l'appareil et une prise 220V en plus de l'autoclave.

4. Option vidange automatique :

Prévoir une évacuation type col de cygne de diamètre 40 à l'aplomb de l'emplacement de l'autoclave.

5. Option E-memory et E-wifi :

L'installation est à effectuer par l'utilisateur (comme pour tout logiciel informatique acheté dans le commerce). Pour le système E-wifi l'ordinateur doit être équipé d'une sortie Wifi.

Toutefois, l'E-memory ne fonctionnera que si le PC est équipé du pack Microsoft Office contenant Access et pour les ordinateurs Mac, une version compatible Microsoft sera nécessaire.

Nos techniciens sont souvent sollicités pour des explications relatives aux méthodes de stérilisation. Il est préférable de vous adresser à votre distributeur ou de prendre contact avec EURONDA France directement au **03.44.06.69.70**. Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les éclaircissements dont vous avez besoin. Nous vous remercions par avance du respect de ces consignes.

EURONDA FRANCE